



SONICflex[®]

Libro delle punte.

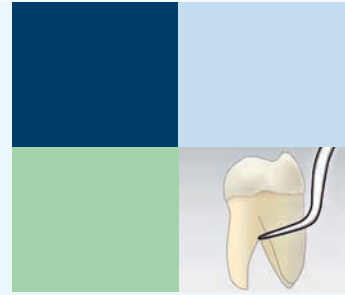

**Nuove
applicazioni**
Stripping / Shaping
Allungamento
di corona




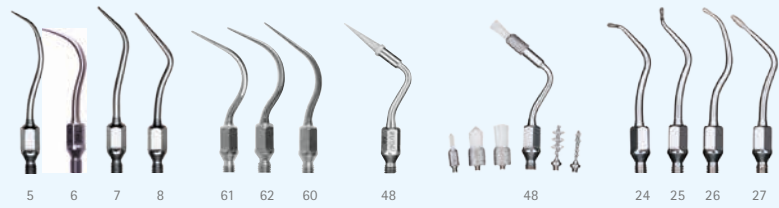


scaler | paro | implant | clean | rootplaner




micro | bevel | stripping, shaping | seal | caries

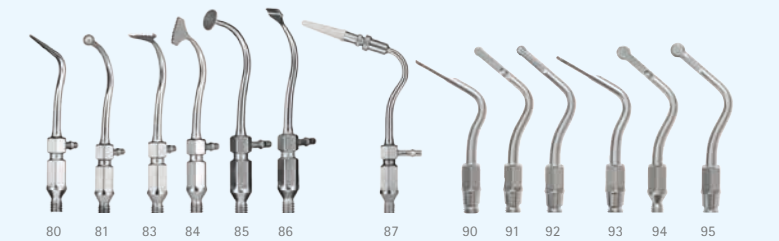

bone | crown extension

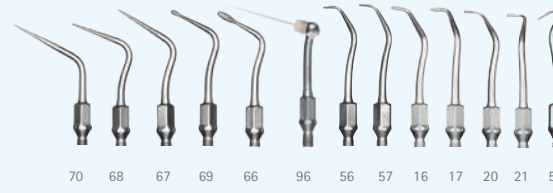

endo | retro

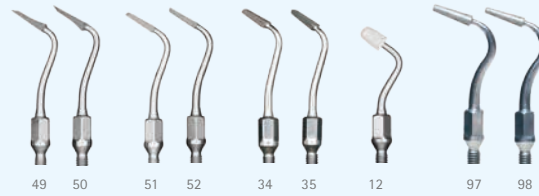

gold | ceram | CAD/CAM | cem | crown

Versatilità al massimo livello.

Grazie alle ampie possibilità di trattamento offerte, SONICflex diventerà presto uno strumento di cui non potrete fare a meno.

Grazie ai numerosi inserti si adegua perfettamente alle vostre esigenze.

Numerose possibilità, punti di forza e vantaggi per voi:

- Più inserti e quindi maggiori possibilità di impiego di qualsiasi altro aircaler
- Oltre 50 punte diverse
- Per tutti i campi di applicazione
- Base per un trattamento minimamente invasivo di successo



SONICflex® Panoramica inserti.

KaVo **master** series



Cambio della punta veloce e comodo: basta una sola rotazione anche con raccordo per attacchi Sirona

KaVo **expert** series



KaVo **smart** series



Il vostro vantaggio quotidiano in termini di potenza.

KaVo SONICflex è l'airscaler più potente e silenzioso della sua classe. È sicuramente lo strumento che vanta il più ampio spettro di applicazioni. Grazie ai livelli di potenza regolabili supporta in modo efficace e preciso il vostro lavoro in funzione del tipo di indicazione.

Tecnologia superiore, punti di forza e vantaggi per voi:

- Potenza regolabile in tre livelli – condizioni di lavoro ottimali per tutte le indicazioni
- Silenziosità notevolmente superiore a quella di prodotti concorrenti (fino a 15 dB): tutela la salute del personale dello studio e dei pazienti
- Non occorrono strumenti supplementari, basta una semplice operazione di innesto sull'attacco KaVo MULTIflex oppure su quello Sirona, senza fastidiosi grovigli di cavi
- Illuminazione ottimale: 25.000 Lux – per una visibilità rilassata, senza affaticare gli occhi
- Proverbiale qualità KaVo: SONICflex 2008 L è già la terza generazione di scaler KaVo, il risultato di 25 anni di esperienza

Inserto SONICflex scaler n. 5

Trattamento: per la rimozione di grandi quantità di tartaro
 Forma: universale



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5171
 1.005.8949

Inserto SONICflex scaler n. 8

Trattamento: per la rimozione del tartaro sopra e sotto-gengivale
 Forma: paro, extra lungo



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5371
 1.006.1953

Inserto SONICflex scaler n. 6

Trattamento: per la rimozione del tartaro sopra-gengivale
 Forma: falchetto



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



0.571.5181
 1.005.8950

Inserto SONICflex scaler n. 7

Trattamento: per la rimozione del tartaro sopra-gengivale
 Forma: paro



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS




0.571.5191
 1.005.8951

Inserto SONICflex scaler n. 48

Trattamento: eliminazione della placca, pulizia di solchi, pulizia di cavità e monconi protesici
 Forma: diverse punte applicabili e spazzole monouso



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
 spazzolino clean n. 1
 spazzolino clean n. 2
 spazzolino clean n. 3
 spazzolino clean n. 4
 spazzolino clean n. 5
 spazzolino clean n. 6
 inserto n. 48
 inserto n. 48 A

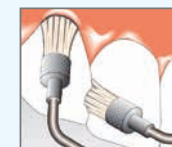

0.571.0001
 1.006.2026
 0.571.0402
 0.571.0412
 0.571.0422
 0.571.0432
 0.571.0472
 0.571.0482
 0.571.0401
 1.006.1982

Profilassi

Inserto SONICflex paro n° 60

Trattamento: pulizia delicata delle tasche parodontali nella terapia della parodontite; pulizia efficace della tasca fino a 9 mm di profondità; per la parte dei denti frontali, superfici lisce

Forma: inserto lungo, diritto - superficie arrotondata



0.571.7402
1.006.1934

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

Inserto SONICflex paro n° 61

Trattamento: pulizia delicata delle tasche parodontali nella terapia della parodontite; pulizia efficace della tasca fino a 9 mm di profondità; per premolari, molari

Forma: inserto inclinato ad angolo, sinistro - superficie arrotondata



0.571.7412
1.006.1935

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

Inserto SONICflex paro n° 62

Trattamento: pulizia delicata delle tasche parodontali nella terapia della parodontite; pulizia efficace della tasca fino a 9 mm di profondità; per premolari, molari

Forma: inserto inclinato ad angolo, destro - superficie arrotondata



0.571.7422
1.006.1936

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

Inserto SONICflex implant

Trattamento: rimozione efficace di depositi e concrezioni sotto-gengivali negli impianti

Forma: inserto cuneiforme, inserto monouso in plastica (PEEK)



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
Inserto monouso in plastica (30 pz.)

1.003.8167
1.006.2027
1.003.8168

Parodontologia

SONICflex rootplaner, inserto n. 24

Trattamento: per le forcazioni di difficile accesso, consente l'accesso agli ingressi approssimali delle forcazioni anche con arcata dentaria chiusa

Forma: boccio a contrangolo, piccolo, **sinistro**, diamantatura D25



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5621
1.006.1957

SONICflex rootplaner, inserto n. 27

Trattamento: pulizia efficace di superfici lisce e concavità

Forma: paro extra lungo, boccio, **grande**; diamantatura D25



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5651
1.006.1963

SONICflex rootplaner, inserto n. 25

Trattamento: per le forcazioni di difficile accesso, consente l'accesso agli ingressi approssimali delle forcazioni anche con arcata dentaria chiusa

Forma: boccio a contrangolo, piccolo, **destro**, diamantatura D25



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5631
1.006.1959

SONICflex rootplaner, inserto n. 26

Trattamento: pulizia efficace di superfici lisce e concavità

Forma: universale, boccio, **piccolo**; diamantatura D25



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5641
1.006.1961

Parodontologia



SONICflex micro, inserto n. 30

Trattamento: terapia minimamente invasiva in caso di carie iniziale
 Forma: piccola semisfera, **mesiale**, diamantatura D46




Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto pr SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6811
1.006.1969

SONICflex micro, inserto n. 33

Trattamento: terapia minimamente invasiva in caso di carie iniziale
 Forma: piccola semisfera, **distale**, diamantatura D46

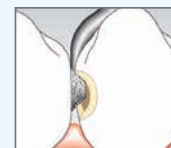


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6821
1.006.1975

SONICflex micro, inserto n. 31

Trattamento: terapia minimamente invasiva in caso di carie iniziale
 Forma: piccola semisfera, **distale**, diamantatura D46

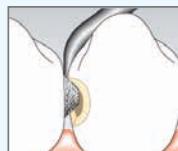


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6801
1.006.1971

SONICflex bevel, inserto n. 58

Trattamento: i bordi approssimali delle cavità vengono smussati
 Forma: mesiale, diamantatura D46

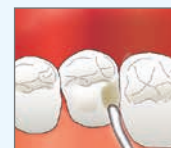


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7392
1.006.1988

SONICflex micro, inserto n. 32

Trattamento: terapia minimamente invasiva in caso di carie iniziale
 Forma: piccola semisfera, **mesiale**, diamantatura D46

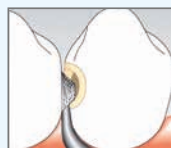

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.6831
1.006.1973

SONICflex bevel, inserto n. 59

Trattamento: i bordi approssimali delle cavità vengono smussati
 Forma: distale, diamantatura D46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7382
1.006.1990

Minima invasività

SONICflex seal, inserto n. 45

Trattamento: preparazione minimamente invasiva dei solchi, ingrandimento indolore dei solchi
Forma: conico, inserto diritto Ø 0,5 mm, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.8323
1.007.1506

SONICflex cariex TC, inserto n. 71

Trattamento: rimozione a strati della parte principale della struttura cariata
Forma: a sfera, Ø 1,0 mm, metallo duro




Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7362
1.006.2002

SONICflex cariex D, inserto n. 42

Trattamento: escavazione della carie sonoabrasiva, senza danneggiare la sostanza del dente, fine
Forma: a sfera, Ø 0,8 mm, diamantatura D 64

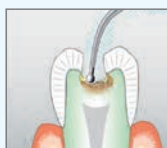


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7105
1.006.1980

SONICflex cariex TC, inserto n. 72

Trattamento: rimozione a strati della parte principale della struttura cariata
Forma: a sfera, Ø 1,4 mm, metallo duro

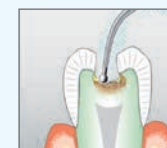


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7363
1.006.2004

SONICflex cariex D, inserto n. 43

Trattamento: escavazione della carie sonoabrasiva, senza danneggiare la sostanza del dente, fine
Forma: a sfera, Ø 1,2 mm, diamantatura D 64

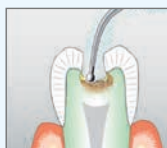

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.7167
1.006.1981


Minima invasività



SONICflex prep gold, inserto n. 49 mesiale

Trattamento: preparazione precisa di diversi angoli di bordi nella zona del margine dopo la "preparazione grossolana" effettuata in modo rotante; in questo modo è possibile un miglior restauro dentale sotto il profilo odontotecnico

Forma: **mesiale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60° cervicale - 30°, diamantatura D 46

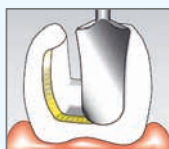


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7212
1.006.1983

SONICflex prep ceram, inserto n. 52

Trattamento: preparazione precisa di diversi angoli nei bordi marginali, passaggi armonici delle zone del margine cervicale e laterale

Forma: **distale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60°, cervicale - 75°, diamantatura D 46

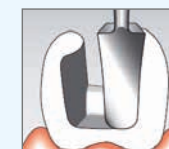



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7272
1.006.1986

SONICflex prep gold, inserto n. 50 distale

Trattamento: preparazione precisa di diversi angoli nei bordi marginali dopo la "preparazione grossolana" effettuata in modo rotante, in questo modo è possibile un migliore restauro sotto il profilo odontotecnico

Forma: **distale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60°, cervicale - 30°, diamantatura D 46

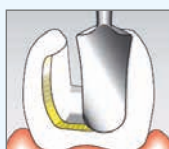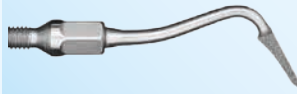



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7222
1.006.1984

SONICflex prep ceram, inserto n. 51

Trattamento: preparazione precisa di diversi angoli nei bordi marginali, passaggi armonici delle zone del margine cervicale e laterale

Forma: **mesiale**, inserti con angoli di bordi definiti: laterale - 60° cervicale - 75°, diamantatura D 46

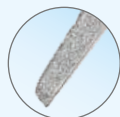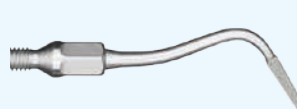

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7262
1.006.1985

Protetica

SONICflex prep CAD / CAM, inserto n. 34

Trattamento: perfetto adattamento della preparazione della cavità ai processi tecnici nei sistemi CAD-CAM

Forma: **mesiale**, angolo laterale 30°, angolo cervicale 90°, diamantatura D 46



1.002.1984

1.006.1977

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

SONICflex prep CAD / CAM, inserto n. 35

Trattamento: perfetto adattamento della preparazione della cavità ai processi tecnici nei sistemi CAD-CAM

Forma: **distale**, angolo laterale 30°, angolo cervicale 90°, diamantatura D 46



1.002.1986

1.006.1979

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto a SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

Punta SONICflex stripping n. 73

Trattamento: Separazione preliminare alla preparazione del moncone coronale
Arrotondamento degli spigoli prossimali della preparazione cavitaria
Perfezionamento anatomico delle superfici prossimali di otturazioni in composito

Forma: **piatta, mesiale**, diamantata (D 25)



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.011.2993

1.011.2994

Punta SONICflex stripping n. 74

Trattamento: Separazione preliminare alla preparazione del moncone coronale
Arrotondamento degli spigoli prossimali della preparazione cavitaria
Perfezionamento anatomico delle superfici prossimali di otturazioni in composito

Forma: **piatta, distale**, diamantata (D 25)

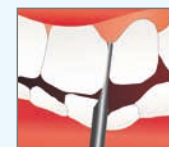

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2995

1.011.2996

Protetica

Punta SONICflex shaping n. 75

Trattamento: Separazione preliminare alla preparazione del moncone coronale
Arrotondamento degli spigoli prossimali della preparazione cavitaria
Perfezionamento anatomico delle superfici prossimali di otturazioni in composito arcuata, **mesiale**, diamantata (D 25)

Forma:



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2997
1.011.2998

Punta SONICflex shaping n. 76

Trattamento: Separazione preliminare alla preparazione del moncone coronale
Arrotondamento degli spigoli prossimali della preparazione cavitaria
Perfezionamento anatomico delle superfici prossimali di otturazioni in composito arcuata, **distale**, diamantata (D 25)

Forma:



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.2999
1.011.3000

SONICflex cem, inserto n. 12

Trattamento: inserimento delicato di inlay
Forma: cappetta protettiva in plastica arrotondata



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
Rivestimento CEM

0.571.5431
1.006.2021
0.571.7142

SONICflex crown prep, inserto n. 97

Trattamento: preparazione monconi protesici - ideale per questa indicazione è la combinazione di strumenti di preparazione monconi protesici rotanti e inserti sonici della stessa forma.

Forma: arrotondata, diamantatura D46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L e 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.008.6383
1.008.6384

SONICflex crown prep, inserto n. 98

Trattamento: preparazione monconi protesici - ideale per questa indicazione è la combinazione di strumenti di preparazione monconi protesici rotanti e inserti sonici della stessa forma.

Forma: piatta, diamantatura D46




Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L e 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S

1.008.6385
1.008.6386

Protetica

SONICflex retro, inserto n. 56

Trattamento: ricerca / identificazione del canale radicolare.
 Notevole semplificazione del lavoro di pura preparazione di cavità retrograde
 Forma: inserto cilindrico estremamente sottile, **sinistro**, diamantatura D 46

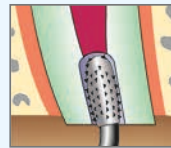


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7322
 1.006.2040

SONICflex retro, inserto n. 17

Trattamento: preparazione del canale radicolare, notevole semplificazione dell'accesso in presenza di forte incurvatura della radice
 Forma: **destro**, piccolo cilindro, diamantatura D 64

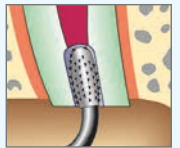


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5581
 1.006.2035

SONICflex retro, inserto n. 57

Trattamento: ricerca / identificazione del canale radicolare.
 Notevole semplificazione del lavoro di pura preparazione di cavità retrograde
 Forma: inserto cilindrico sottile, **destro**, diamantatura D 46

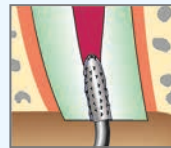


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7332
 1.006.2041

SONICflex retro, inserto n. 20 e n. 21

Trattamento: preparazione del sottosquadro. Preparazione conforme all'asse del canale radicolare in presenza di difetto osseo minimo.
 Forma: a pera, **piccolo, sinistro** (n. 20), **destro** (n. 21), diamantatura D 64

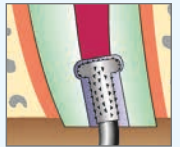

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5521
 1.006.2037



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5561
 1.006.2038

SONICflex retro, inserto n. 16

Trattamento: preparazione del canale radicolare, notevole semplificazione dell'accesso in presenza di forte incurvatura della radice
 Forma: **sinistro**, cilindro piccolo, diamantatura D 64



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.5541
 1.006.2036

SONICflex retro, inserto n. 55

Trattamento: per radici dall'apice ad inclinazione fortemente frontale
 Forma: diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

0.571.7342
 1.006.2039

Resezione dell'apice della radice

SONICflex endo, inserto n. 66

Trattamento: formazione della cavità di accesso, rimozione eccedenze
 Forma: bocciolo, **grande**, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.000.5825
 1.006.1992

SONICflex endo, inserto n. 67

Trattamento: ingrandimento canali di maggiori dimensioni
 Forma: conico **125°**, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS



1.000.5822
 1.006.1994

SONICflex endo, inserto n. 68

Trattamento: ingrandimento canali di maggiori dimensioni
 Forma: conico **112°**, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.000.5823
 1.006.1996

SONICflex endo, inserto n. 69

Trattamento: rimozione di residui dell'otturazione del canale radicolare
 Forma: bocciolo, **piccolo**, diamantatura D 46



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

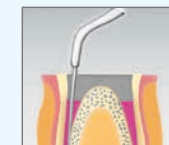


1.000.5827
 1.006.1998

SONICflex endo, inserto n. 70

Trattamento: per canali particolarmente lunghi e larghi
 Forma: conico **117°**, diamantatura D 25
 parte anteriore non diamantata



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
 adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

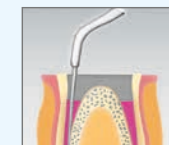

1.000.5821
 1.006.2000


SONICflex endo clean, inserto n. 96

Trattamento: per il lavaggio del canale radicolare, per rimuovere detriti e smear layer e per aumentare la soluzione di lavaggio antibatterica
 Forma: 105° o angolo 75°



Codice: adatto per
 SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
 SONICflex Endo clean set A 1.007.1142
 SONICflex Endo clean, inserto A 1.008.5164
 adatto per SONICflex 2000 N / L e 2003 / L
 SONICflex Endo clean, inserto 1.008.5163
 SONICflex Endo clean set 1.006.2045

Endo clean, aghi per SONICflex 2000 N / L, 2003 e 2008
 SONICflex Endo clean 015 bianco 1.006.2042
 SONICflex Endo clean 020 giallo 1.006.2043
 SONICflex Endo clean 025 rosso 1.006.2044

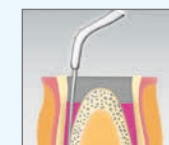

Endodonzia

Punta SONICflex crown extension 020 n. 90

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate
Gummy Smile

Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: piccola, rettilinea, con superficie esterna diamantata (D 46)



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3001
1.011.3002

Punta SONICflex crown extension 020 n. 92

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate
Gummy Smile

Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: piccola, con superficie esterna diamantata (D 46)



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3005
1.011.3006

Punta SONICflex crown extension 0020 n. 91

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate
Gummy Smile

Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: piccola, obliqua, con superficie esterna diamantata (D 46)



Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.011.3003
1.011.3004

Punta SONICflex crown extension 030 n. 93

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate
Gummy Smile

Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: grande, rettilinea, con superficie esterna diamantata (D 46)

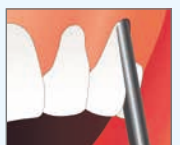

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS


1.011.3007
1.011.3008

Chirurgia

Punta SONICflex crown extension 030 n. 94

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate Gummy Smile
Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: grande, obliqua, con superficie esterna diamantata (D 46)

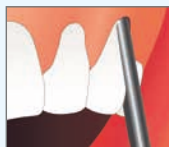


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3009
1.011.3010

Punta SONICflex crown extension 030 n. 95

Trattamento: Allungamento chirurgico della corona a minima invasività senza lembo grazie al leggero movimento della punta sonica per il ripristino dell'ampiezza biologica in caso di: asimmetria delle arcate Gummy Smile
Lesione dell'ampiezza biologica

Forma: grande, obliqua, con superficie esterna diamantata (D 46)

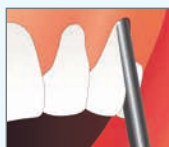


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.011.3011
1.011.3012

SONICflex bone, inserto n° 80

Trattamento: taglio delle fibre di Sharpey. Allargamento degli alveoli: rimozione dei residui radicalari; estrazione delicata prima dell'impianto; osteotomia (bone splitting)

Forma: quadro, tagliente

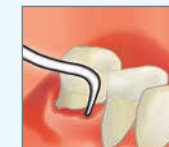


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3875
1.006.2006

SONICflex bone, inserto n° 81

Trattamento: preparazione della finestra ossea del rialzo del seno. In caso di sostanza corticale dell'osso molto massiccia tagliare eventualmente con rotazione e con l'inserto diamantato rimuovere l'osso residuo

Forma: sfera, grande, diamantatura D 46

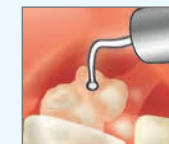


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3876
1.006.2008

SONICflex bone, inserto n° 83

Trattamento: prelievo di blocchi ossei, osteotomie (distrazione, bone splitting). In caso di sostanza corticale dell'osso spessa lavorare eventualmente con rotazione

Forma: sega sagittale

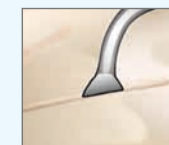


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3878
1.006.2012

Chirurgia

SONICflex bone, inserto n° 84

Trattamento: prelievo di blocchi ossei, osteotomie (distrazione, bone splitting).
In caso di sostanza corticale dell'osso spessa lavorare eventualmente con rotazione
Forma: sega assiale

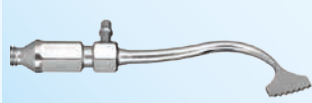


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.004.3879
1.006.2014

SONICflex bone, inserto n° 85

Trattamento: ideale per il distacco in sicurezza della membrana di Schneider nel rialzo del seno grazie alla forma a zampa di elefante
Forma: zampa d'elefante

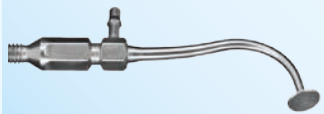


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.006.0645
1.007.1624

SONICflex bone, inserto n° 86

Trattamento: ideale per ricavare in modo semplice e veloce quantitativi maggiori di osso, soprattutto per l'aumento dell'osso
Forma: Raschietto

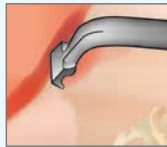


Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS

1.006.0741
1.007.1625

SONICflex bone, inserto n° 87

Trattamento: ideale per tagli stretti, per il distacco dei legamenti
Forma: sega assiale, lame intercambiabili
spessore lama: 0,15 mm

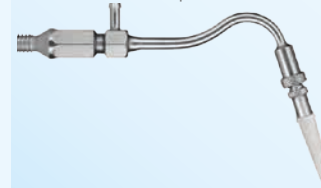

Codice: adatto per SONICflex 2000 N / L, 2003 / L
adatto per SONICflex 2008 / L, 2008 S / LS
lama (5 pz.)

1.006.1406
1.007.1627
1.006.1405

Accessori:



Codice: chiave dinamometrica

1.000.4887



Codice: cassetta sterile

0.411.9101



Codice: chiave

0.411.0892



Codice: raccordo per l'apporto di soluzione fisiologica, per SONICflex 2003
raccordo per l'apporto di soluzione fisiologica, per SONICflex 2008

1.000.6296
1.006.5966

Chirurgia



KaVo. Dental Excellence.