


# TOPDENT „MEISTER FINISH CERAMIC END BRUSH“

## KERAMIKFASERN CERAMIC FIBRES

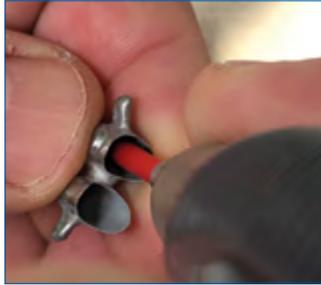

Zum Vorpolieren ohne oder mit Diamantpolierpaste (Seidenglanzpolitur). Für sehr feine Oberflächenstruktur bei gegossenen Sekundärteleskopen sowie bei konventionell gegossenen Kronen und Brücken aus EM oder NEM. Gute Möglichkeit Oxid und Gußrauhigkeiten – auch in der Tiefe – zu entfernen und um schonend die Friktion bei der Teleskop-Technik einzustellen, da die Keramikfasern nicht auffächern. Ein senkrechtes/paralleles Arbeiten zum Kronenrand, sowie die maximale Drehzahl von 10.000 min<sup>-1</sup> verlängern die Lebensdauer.

○ max. 6.000 - 10.000 min<sup>-1</sup>

For the pre-polish with or without diamond polishing paste (silky lustre polish). For very fine surface structures of casted secondary crowns, as well as for conventionally casted PM or NPM crowns and bridges. Best possibility to remove oxide or cast roughnesses and to adjust gently the friction of telescopes, since the ceramic fibres do not fan out. Vertical/parallel use, as well as a max. rotation speed of 10.000 min<sup>-1</sup> extend service life.



**Anwendungsvideo**  
„How to use“ video  
[www.youtube.be/  
PDbAZ5NOM3U](http://www.youtube.be/PDbAZ5NOM3U)


Gemeinsam für gesunde Zähne  
Together for healthy teeth

[www.kkd-topdent.de](http://www.kkd-topdent.de)

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH  
Geschäftsbereich **TOPDENT**  
Mühlgraben 36  
D-73479 Ellwangen/Jagst  
Telefon: +49 (7961) 91 26-0  
Fax: +49 (7961) 5 20 31  
[info@kkd-topdent.de](mailto:info@kkd-topdent.de)

Beim Abnutzen und bei reduzierter Polierleistung kann der Kopf der Keramikfasern mit einer Diamantscheibe für eine ideale Weiterverwendung gekürzt werden.

Worn out or with reduced polishing performance the head of the fibres may be cut with a diamond disc for ideal reuse.

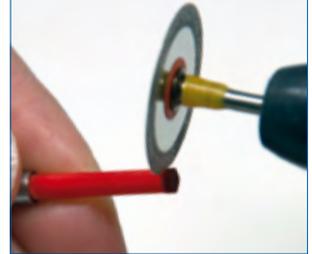

Weiss - dicke Fasern/  
white - thick fibres  
1 St./ pc. REF **23280**

Rot - dünne Fasern/  
red - thin fibres  
1 St./ pc. REF **23281**

