

Dental Excellence
da ogni punto di vista.



Attrezzatura per lo Studio

Riuniti Kavo, lampade, poltrone odontoiatriche, sistemi di comunicazione con il paziente, microscopi dentali e altri accessori per lo Studio KaVo.



Strumentazione

Manipoli e contrangoli per laboratori odontoiatrici, turbine, manipoli per lucidatura ad aria e dispositivi dalle dimensioni ridotte per ogni applicazione, dalla diagnostica, passando per la profilassi, alla conservativa, la chirurgia, l'endodonzia, la cura e la manutenzione della strumentazione.

I prodotti, le apparecchiature e i servizi illustrati e descritti in questo catalogo non sono disponibili in tutti i paesi. Tutte le informazioni sono fornite in base alle conoscenze al momento della stampa. KaVo Dental GmbH non si assume alcuna responsabilità per variazioni di colore o forma dalle illustrazioni, per errori o errori di stampa e si riserva il diritto di apportare cambiamenti alla brochure in qualsiasi momento. La ristampa, anche solo di estratti, è consentita unicamente previa autorizzazione di KaVo Dental GmbH.

PROPHYflex 4
Lucidatura ad aria per una pulizia confortevole.



Focus Open 2018 Gold

Prodotto dal design eccellente
KaVo PRO PHYflex 4 ha vinto il Focus Open 2018 Gold award per il suo straordinario design sempre attuale. La giuria ha apprezzato il bilanciamento ergonomico del manipolo e la ventata di freschezza dei colori.

Tre manipoli in uno: perfetto per applicazioni sopragengivali e sottogengivali.

Con il nuovo PROPHYflex 4 avrete a disposizione uno straordinario dispositivo all-in-one. Adatto a tutti i denti, a tutti i pazienti e alla maggior parte delle applicazioni, per lavorare a livello sopragengivale e sottogengivale.

Supragingival.




Comodo da tenere in mano.

Scegliete la lunghezza del manipolo adatta a voi, per un'ottima maneggevolezza e per lavorare senza affaticarvi grazie all'ergonomia e al perfetto bilanciamento.



Totale flessibilità

Due cannule sopragengivali per una pulizia che va dall'eccezionale delicatezza all'elevata potenza. Per ogni trattamento potrete scegliere tra la cannula standard e la nuovissima cannula Power.

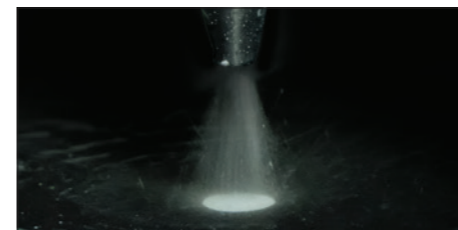

Felicità pura.

La lucidatura ad aria omogenea e mirata prodotta dalla cannula PROPHYflex standard protegge lo smalto e al tempo stesso riduce significativamente il pulviscolo prodotto dalla lucidatura.



Impostazioni di potenza regolabili.


Grazie ai tre diversi livelli regolabili, siete voi a determinare le prestazioni della pulizia: da assenza di polvere a massima intensità di pulizia.

Subgingival.



Rimuove il biofilm.

Grazie al getto concentrato, potrete lavorare con estrema precisione e, con il contrassegno in linea con la vostra sonda WHO, avrete sempre una perfetta visione della tasca.

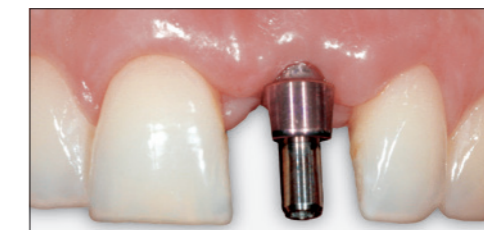

Un'eccezionale strumento tutto in uno grazie al getto concentrato.

La punta Perio tip è pensata per le applicazioni sottogengivali, ma può essere utilizzata anche per la pulizia di impianti, corone e ponti e per eliminare le discromie di colletti dentali esposti.

La perfetta ergonomia non è mai stata così flessibile ...

Volete che i vostri trattamenti quotidiani di profilassi siano più semplici, più veloci, più meticolosi e persino più gradevoli durante le sedute più lunghe? Con il nuovo KaVo PROPHYflex 4 si ottengono tutti questi vantaggi. È leggero come una piuma, perfettamente bilanciato ed ergonomico per consentire di lavorare in maniera più comoda.

Cannula PROPHYflex standard

La lucidatura ad aria di elevata precisione produce meno pulviscolo fastidioso, consentendo la rimozione delicata di biofilm e discromie. La stretta cannula fornisce all'operatore una visione migliore durante la pulizia supragengivale.

Attacco PROPHYflex Perio

Perio Kit opzionale per un trattamento sottogengivale mirato e delicato e per pulire ponti, impianti e corone.

Cannula PROPHYflex Power

La cannula Power rimuove anche le discromie più ostinate in pochissimo tempo.



... e la flessibilità non è mai stata così comoda.

Il sistema KaVo PROPHYflex 4 è personalizzabile, perché ogni mano, ogni trattamento, ogni paziente è diverso. Spetta a voi stabilire se lavorare a livello sottogengivale o supragengivale, se eliminare le discromie lievi o severe e quanto deve essere lungo il manipolo.

Su misura per voi.

Due impugnature girevoli con diverse lunghezze che si adattano perfettamente alle vostre mani. Sono l'ideale, anche quando diversi specialisti lavorano con lo stesso manipolo. Per lavorare in tutta comodità anche in punti difficili da raggiungere, grazie al raccordo che ruota a 360°.

Lavorate senza sforzo, in completo relax.

Un manipolo super leggero e perfettamente bilanciato con lunghezze personalizzabili, per un utilizzo confortevole e un trattamento senza stress.

Sicuri e pronti per ogni esigenza.

La superficie uniforme consente un riempimento semplice e una sicura applicazione. Per non dover interrompere il trattamento, il contenitore per la polvere può essere riempito in anticipo e sigillato con un tappo di gomma che mostra l'indicazione.

Tre è meglio.

Tre livelli regolabili. Il primo è dedicato alla pulizia senza polvere dei denti per rimuovere i residui di polvere. I livelli 2 e 3 sono per operazioni di pulizia regolabili individualmente in base a paziente e indicazioni.

Trovare un attacco è diventato più semplice.

Scegliete un attacco KaVo o Sirona.



Raccomandato dagli specialisti.

"Il nuovo PROPHYflex 4 è perfetto per la mia attività quotidiana: si tiene comodamente in mano e può essere configurato individualmente grazie alle due lunghezze dell'impugnatura girevole. La nebulizzazione spray può essere facilmente controllata, e questo piace anche ai pazienti."

Tanja Wicharz / Esperta in profilassi e formatrice

Un vero piacere.
Prima, durante e dopo il trattamento.



Per la migliore igiene possibile, il corpo del dispositivo KaVo PROPHYflex 4 ha un design uniforme. PROPHYflex 4 può essere facilmente smontato, pulito, disinfettato e anche sterilizzato.



La mia punta, per la massima affidabilità.

“Dopo ogni applicazione e prima di ogni preparazione, far funzionare PROPHYflex 4 connesso all’attacco per turbina per un minuto con acqua e poi senza acqua. In questo modo, sarete certi che non ci siano residui di polvere all’interno di PROPHYflex 4 che potrebbero bloccarlo. Il residuo di polvere all’interno del manico PROPHYflex 4 può essere eliminato anche utilizzando il primo dei tre livelli regolabili. Una volta pulito e preparato, il dispositivo è pronto per il prossimo trattamento.”



Annett Preuß
esperta vendite di KaVo Kerr
Strumentazione per la Germania


PROPHYflex 4 è disponibile in tre colori brillanti.

Previsioni future:
meno nebulizzazione di polvere



La quantità regolabile di polvere e la lucidatura ad aria costante e mirata della cannula standard PROPHYflex assicurano pura soddisfazione e un’igiene ottimizzata grazie ad una applicazione precisa delle polveri e alla riduzione del fastidioso pulviscolo prodotto durante la lucidatura.

Forte contro le macchie,
delicato sui denti.

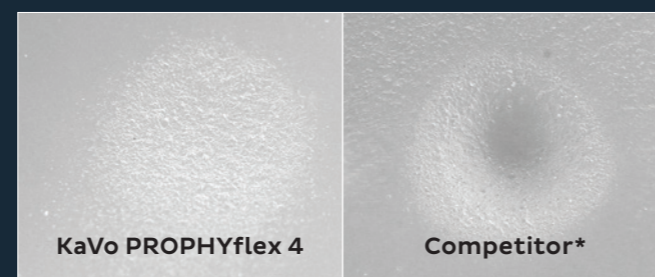

L’energia uniformemente distribuita lungo la superficie del getto ha due vantaggi: più il getto si distribuisce in maniera uniforme, più la pulizia è efficace e maggiore è la protezione della struttura del dente.

* Abrasione con PROPHYpearls in confronto con il dispositivo per lucidatura ad aria di un competitor che utilizza carbonato di calcio. Su un composito SonicFill™.

Tre cannule per il trattamento
personalizzato del paziente.



Grazie alle tre cannule disponibili e alla regolazione in tre fasi di PROPHYflex 4, è possibile garantire un trattamento personalizzato e numerose applicazioni cliniche.

Nessuna perdita di tempo:
contenitori per polvere richiudibili.



I contenitori per polvere possono essere chiusi con un tappo: l’ideale quando si preparano trattamenti in cui la polvere deve corrispondere all’indicazione. Basta collegare il contenitore pre-riempito e partire.

Anche quello che c'è dentro è importante:
polvere per pulizia per PROPHYflex 4.


PROPHYpearls, polvere PROPHYflex e PROPHYflex Perio Powder sono assolutamente adatti a KaVo PROPHYflex 4 e permettono una pulizia dei denti meticolosa e delicata allo stesso tempo.



KaVo PROPHYpearls.

Per una pulizia a tutto tondo e una profilassi delicata.


- Indicazioni: rimozione efficace di discromie, placca e biofilm.
- Principio attivo: carbonato di calcio, con particelle da 60-70 µm, biodegradabile, senza sale, zucchero, né glutine.
- Caratteristiche: forma tonda e dimensioni uniformi per una perfetta pulizia con minima abrasione, quattro varianti aromatiche e due neutre.

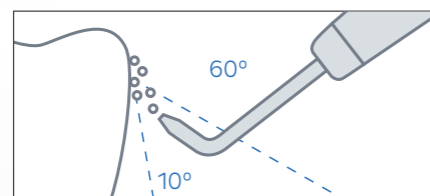


Polvere KaVo PROPHYflex:

la pulizia può essere rapidissima.

- Indicazioni: rimozione altamente efficace di discromie, placca e biofilm.
- Principio attivo: bicarbonato di sodio con particelle da 60-70 µm, idrosolubile.
- Caratteristiche: trattamento semplice, veloce ed efficace, con possibilità di scelta tra quattro gusti.

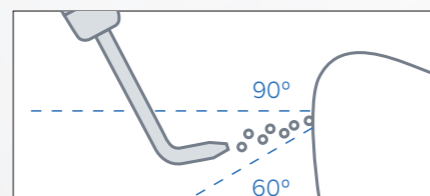

Un solo prodotto in tasca:
procedure sottogengivali con PROPHYflex 4.

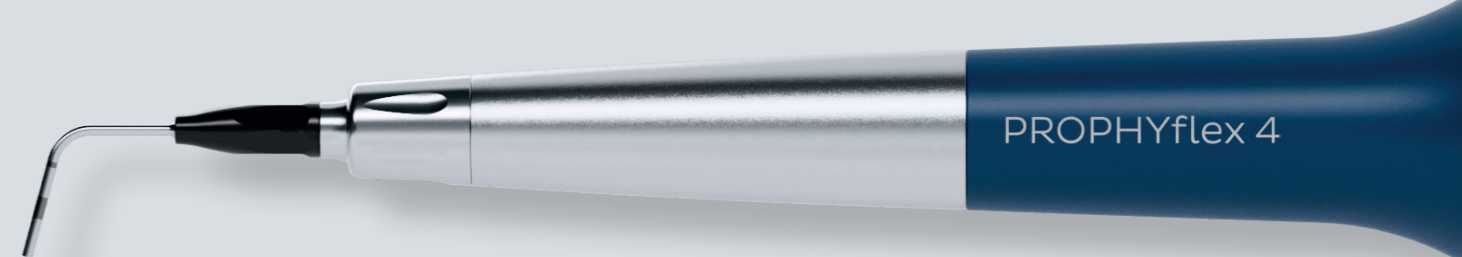

**Perio Kit e Perio Powder
per procedure sottogengivali.**

Con PROPHYflex 4, non sarà più necessario sostituire il dispositivo quando si passa dal trattamento sopragengivale a quello sottogengivale o per la pulizia degli impianti. Basta collegare Perio tip, riempire con Perio Powder, scegliere il livello di prestazione corretto ed è fatta.


- Pulizia della tasca sicura e mirata grazie alla stabile e sottile Perio tip, con marcatura profonda.
- Eccellente accessibilità grazie alla buona visibilità e alla forma sottile.
- Igienica e multiapplicazione: ogni punta può essere sterilizzata per un massimo di 10 cicli.



KaVo PROPHYflex Perio Powder:

per trattamenti sopragengivali e sottogengivali.

- Indicazioni: efficiente gestione del biofilm nelle tasche parodontali e pulizia di corone, ponti e impianti.
- Principio attivo: polvere di glicina fine (18-22 µm), protegge le gengive.
- Caratteristiche: delicata e non troppo abrasiva, adatta alla pulizia efficace delle tasche e per applicazioni sopragengivali sugli impianti.

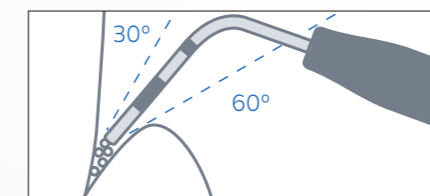

Lucidatura ad aria con Kavo PROPHYflex 4: il cuore del World of Smile Kavo.



Il sorriso genera dalla felicità: il sistema KaVo per lucidatura ad aria è al centro del World of Smile Kavo Kerr. Il dispositivo per lucidatura ad aria ergonomico e regolabile Kavo PROPHYflex 4 si adatta perfettamente a PROPHYpearls, polvere PROPHYflex, PROPHYflex Perio Kit e Perio Powder.

La riuscita a tutto tondo della profilassi è garantita anche da altri prodotti KaVo e Kerr: dalla preparazione del paziente per una visibilità ottimale, i prodotti per una detartrasi meticolosa e delicata, le soluzioni per la lucidatura dei denti, fino agli innovativi dispositivi per la rilevazione precoce della carie senza raggi X.

Informazioni, video e notizie sono disponibili all'indirizzo
www.kavo.com/it/PROPHYflex4



Kerr OptiView™ per la preparazione del paziente.

Grazie al flessibile design 3D, Kerr OptiView consente un'applicazione e una rimozione rapide e comode. La retrazione periorale uniforme offre una visuale non ostruita e libero accesso alla cavità orale. Consente di effettuare le procedure senza doversi interrompere e in maniera efficiente, anche durante i trattamenti più lunghi, ed è comodo per pazienti e professionisti.



KaVo SONICflex, per una detartrasi efficace.

Indipendentemente dalla punta che si sceglie per la rimozione della placca o la pulizia sottogengivale di tasche dentali o impianti, SONICflex permette di sostituire la punta in maniera semplice e veloce, di eseguire trattamenti comodi che non aggrediscono il tessuto, di ridurre l'accumulo di calore e avere una delicata oscillazione per tutte le indicazioni.



Il sistema Kavo che semplifica la lucidatura ad aria.

Il sistema di pulizia dei denti KaVo trasforma la lucidatura ad aria in divertimento: PROPHYflex 4, il nuovo dispositivo per la lucidatura ergonomico e flessibile in combinazione con PROPHYpearls e polvere PROPHYflex o con PROPHYflex Perio Kit e Perio Powder offre a voi e ai vostri pazienti un motivo per sorridere durante ogni applicazione.



Soluzioni KaVo Kerr per una lucidatura efficiente dei denti.

La simbiosi di KaVo e Kerr, con tre manipoli e contrangoli KaVo SMARTmatic per la profilassi, combinati con Kerr Pro-Cup™ per applicazioni senza schizzi di Kerr Cleanic™ Prophy-Paste sulle pratiche Prophy Clips, garantisce una lucidatura dei denti particolarmente efficace.



KaVo DIAGNOcam per la diagnosi della carie.

Usando KaVo DIAGNOcam per la diagnosi precoce della carie, è possibile ottenere facilmente informazioni molto precise mediante la transilluminazione dei denti senza bisogno di raggi X. L'eccellente qualità di queste immagini aumenta l'accettazione dei piani di cura.